



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS  
Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-54(A-0204PNO604219-23-33)**

**Išduotas 2023 m. vasario 20 d., galioja iki 2028 m. vasario 19 d.**

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**  
Ecolab Sp.z o.o., ul. Opolska 114, PL-31323 Krakow (Lenkija).

**Biocidinio produkto tipas**

2 ir 4 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, ir maisto srities dezinfekantas.

**Biocidinio produkto pavadinimas**

Aniospray Quick.

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**

Laboratoires Anios SAS, Pave du Moulin, FR-59260 Lille-Hellemmes (Prancūzija).

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**

Etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6;

poli(oksi-1,2-etandil),  $\alpha$ -[2-(didecilmetilamonio)etil]- $\omega$ -hidroksi-, propanoatas (druska) (bardapas 26), CAS Nr. 94667-33-1.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**

Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams ir inventoriui, išskyrus medicinos priemones, valyti ir dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose, visuomeninės paskirties objektuose ir viešojo maitinimo įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.

**Biocidinio produkto ženklavimas**

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;

biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

**Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**

A0204PNO604219.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

**Vilniaus departamento direktorė A.V.**

**Rolanda Lingienė**

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-54(A-0204PNO604219-23-33)  
1 priedas

**ANIOSPRAY QUICK**

**VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ GAMINTOJAI**

Etanolio, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, gamintojas:

Laboratoires Anios SAS  
Pave du Moulin  
FR-59260 Lille-Hellemmes (Prancūzija);

Poli(oksi-1,2-etandiil),  $\alpha$ -[2-(didecilmetilamonio)etil]- $\omega$ -hidroksi-, propanoato (druskos) (bardapas 26), CAS Nr. 94667-33-1, gamintojas:

YOU Solutions Germany GmbH  
Nattermannallee 1  
DE-50829 Köln (Vokietija)

## ETIKETĖ

### ANIOSPRAY QUICK

Skystis

Veikliosios medžiagos etanolis, CAS Nr. 64-17-5, EB Nr. 200-578-6, 55,0 % (55 g / 100 g), Poli(oksi-1,2-etandiil),  $\alpha$ -[2-(didecilmetilamonio)etil]- $\omega$ -hidroksi-, propanoato (druskos) (bardapas 26), 0,11 % (0,11 g / 100 g).



Labai degūs skystis ir garai.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

Informacija apsinuodijus tel. (8 5) 236 2052.

#### Pavojinga

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui, ir maisto srities dezinfektantas (2 ir 4 produktų tipas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams ir inventoriui, išskyrus medicinos priemones, valyti ir dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose, visuomeninės paskirties objektuose ir viešojo maitinimo įmonėse. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Autorizacijos liudijimo Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-54(A-0204PNO604219-23-33), liudijimo turėtojas: Ecolab Sp.z o.o., ul. Opolska 114, PL-31323 Krakow (Lenkija).

Tūris

Tinka naudoti

## **ANIOSPRAY QUICK**

### **NAUDOJIMO INSTRUKCIJA**

#### **Dėmesio!**

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos priemones.

#### **Naudojimas**

Produktas paruoštas naudojimui ir skirtas nuvalytų paviršių dezinfekavimui.

Paviršius prieš dezinfekavimą nuvalyti, kad neliktų matomų nešvarumų.

Purkšti ant apdorojamo paviršiaus, kol jis taps visiškai drėgnas.

Rekomenduojamas produkto kiekis 40 ml/m<sup>2</sup>.

Ekspozicijos laikas 30 sek.-5 min.

Ekspozicijos metu dezinfekuojami paviršiai turi būti drėgni.

Po dezinfekcijos paviršius, su kuriais liečiasi oda ar maisto produktai, nuplauti vandeniu.

Biocidinio produkto efektyvumas įrodytas laboratoriniais tyrimais pagal standartus EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16777 prieš bakterijas (30 sek.), mieles (30 sek.), grybus (5 min.), mikobakterijas (5 min.), adenovirusus (30 sek.), norovirusus (MNV) (5 min.), apvalkalinius (lipofilinius) virusus (*Vaccinia*) (30 sek.).

#### **Atsargumo priemonės**

Prieš naudojimą įsitikinti, kad apdorojami paviršiai yra suderinami su alkoholiu.

Dezinfekuojami elektros prietaisai turi būti išjungti.

Laikyti pašaliniais asmenims neprieinamoje vietoje, ne žemesnėje kaip +5 ir ne aukštesnėje kaip +35 °C temperatūroje.