



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-460(A-02PNO604404-23-235)**

Išduotas 2023 m. spalio 31 d., galioja iki 2028 m. spalio 30 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Ecolab Sp.z o.o., ul. Opolska 114, PL-31323 Krakow (Lenkija).

Biocidinio produkto tipas

2 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui.

Biocidinio produkto pavadinimas

Incidin Pro.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Ecolab Deutschland GmbH, Ecolab-Allee 1, DE-40789 Monheim am Rhein (Vokietija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

2-fenoksietanolis, CAS Nr. 122-99-6, EB Nr. 204-589-7;

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diaminas (diaminas), CAS Nr. 2372-82-9, EB Nr. 219-145-8;

alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chloridas (ADBAC (C12-16)), CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams, grindims, sienoms, įrenginiams, išskyrus medicinos priemones, valyti ir dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose.

Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklavimas

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;

biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A02PNO604404.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Aktuali redakcija nuo 2024 m. lapkričio 15 d.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-460(A-02PNO604404-23-235)
1 priedas

INCIDIN PRO

VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ GAMINTOJAI/TEIKĖJAI

2-fenoksietanolio, CAS Nr. 122-99-6, EB Nr. 204-589-7, gamintojas:

Basf SE (Vokietija);

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamino (diaminas), CAS Nr. 2372-82-9, EB Nr. 219-145-8, gamintojai:

YOU Solutions Germany GmbH (Vokietija);
Nouryon Surface Chemistry AB (Švedija).

alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chlorido (ADBAC (C12-16)), CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, gamintojai:

Lonza Cologne GmbH (Vokietija);
Thor GmbH (Acting for Thor Specialities (UK) Ltd) (Vokietija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-460(A-02PNO604404-23-235)
2 priedas

ETIKETĖ

INCIDIN PRO

Skystis

Veikliosios medžiagos: 2-fenoksietanolis, CAS Nr. 122-99-6, EB Nr. 204-589-7, 10,0 % (10 g/100 g); N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diaminas (diaminas), CAS Nr. 2372-82-9, EB Nr. 219-145-8, 8,0 % (8 g/100 g); alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chloridas (ADBAC (C12-16)), CAS Nr. 68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 7,5 % (7,5g /100 g).



Kenksminga prarijus.
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Labai toksiška vandens organizmams.
Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.



Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.
Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].



PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.

Pavojinga

Informacija apsinuodijus tel. (+370 5) 236 2052.

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui (2 produktų tipas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams, grindims, sienoms, įrenginiams, išskyrus medicinos priemones, valyti ir dezinfekuoti sveikatos priežiūros įstaigose.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-460(A-02PNO604404-23-235), liudijimo turėtojas: Ecolab Sp.z o.o., ul. Opolska 114, PL-31323 Krakow (Lenkija).

Masė

Tinka naudoti

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5Mr)BPR-460(A-02PNO604404-23-235)
3 priedas

INCIDIN PRO

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemonės.

Naudojimas

INCIDIN PRO skirtas dezinfekuoti ir valyti įvairius plaunamus paviršius sveikatos priežiūros įstaigose.

2 l pakuotė:

Koncentratą praskiesti vandeniu (ne karštesniu kaip 60 °C) iki reikiamos koncentracijos.

Kad paruošti, pvz., 8 litrus 0,25 % (2,5 ml/l) koncentracijos darbinio tirpalo, (1) vieną kartą apsukti butelį ir įpilti vieną 20 ml dozę (2), 8 litrus 0,5 % (5 ml/l) darbinio tirpalo, du kartus apsukti butelį ir įpilti dvi dozes po 20 ml (iš viso 40 ml) (3). Naudoti pakankamą kiekį (+/- 30 ml/m²) ir valyti mechaniniu būdu (pvz., šluoste, šepetiu). Kad užtikrinti reikiamą antimikrobinį poveikį, laikytis rekomenduojamos ekspozicijos trukmės.

6 l pakuotė:

Koncentratą praskiesti vandeniu (ne karštesniu kaip 60 °C) iki reikiamos koncentracijos.

Kad paruošti, pvz., 0,5 % (5 ml/l) koncentracijos darbinį tirpalą, į 8 litrus vandens reikia įpilti 40 ml. Naudoti pakankamą kiekį (+/- 30 ml/m²) ir valyti mechaniniu būdu (pvz., šluoste, šepetiu). Kad užtikrinti reikiamą antimikrobinį poveikį, laikytis rekomenduojamos ekspozicijos trukmės.

Produktas pasižymi baktericidiniu poveikiu pagal EN 13727, EN 16615, mielicidiniu poveikiu pagal EN 13624, EN 16615, tuberkulicidiniu ir mikobaktericidiniu poveikiu pagal EN 14348, virucidiniu poveikiu pagal EN 14476 (prieš *Norovirus*), riboto spektro virucidiniu poveikiu pagal EN 14476 (prieš *Adenovirus* ir *Norovirus*), virucidiniu poveikiu prieš apvalkalinius virusus pagal EN 14476.

Specifiniam naudojimui rekomenduojamos individualiai paruoštos gamintojo atstovo naudojimo instrukcijos.

Atsargumo priemonės

Laikyti originalioje pakuotėje ir temperatūroje nuo 0 °C iki +25 °C.

Šalinti tik tuščią ir uždarytą pakuotę.

Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti paviršius, visada išbandyti ant nedidelio ploto.